

ELYSIUM® HIALURONSAVAS ORRSPRAY PANTHENOLLAL

0,9%-os izotóniás sóoldat

Az ELYSIUM® HIALURONSAVAS ORRSPRAY PANTHENOLLAL hialuronsavat és dexpanthenolt (B5-provitamin) tartalmaz xantángumival kiegészített fiziológiás sóoldatban. Ez az orvostechnikai eszköz védőfilmet képez a nyálkahártyán, és xantángumi-tartalmának köszönhetően segít helyreállítani a nyálkahártya természetes védőrétegét. A hialuronsav és a dexpanthenol hidratáló tulajdonságai révén ideális az orrnyálkahártya szárazságának megelőzésére és kezelésére.

Az ELYSIUM® HIALURONSAVAS ORRSPRAY PANTHENOLLAL egy olyan izotóniás sóoldat, amely használható felnőttek és 1-éves kortól gyermekek számára nátha, allergia vagy egyéb eredetű orrnyálkahártya-gyulladás tüneteinek enyhítésére, valamint kiegészítő terápiaként ezek kezelésében. Alkalmazása olyan helyzetekben ajánlott, amikor az orrnyálkahártya hidratálására van szükség akár influenza vagy allergia okozta orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis), akár műtétet, légkondicionált levegőt vagy gyógyszeres kezelést követő orrszárazság esetén.

Összetétel

Tisztított víz, dexpanthenol (3%) (B5-provitamin), nátrium-klorid (0,9%), kálium-dihidrogén-foszfát, dikálium-hidrogén-foszfát, xantángumi (0,3%), nátrium-hialuronát (0,2%), EDTA dinátriumsó-dihidrát, benzalkónium-klorid és nátrium-hidroxid.

Használati útmutató

1. Használat előtt rázza fel a flakont, majd vegye le a védőkupakot. Első használatkor előfordulhat, hogy a pumpát többször meg kell

nyomni, míg a termék permetezni kezd.

2. Óvatosan vezesse be a szórófejet az egyik orrnyílásba, és nyomja meg a pumpát a termék alkalmazásához.

3. Ismételje meg a műveletet a másik orrnyílással.

2. Tisztítsa meg a szórófej végét vízzel, majd szárítsa meg.

5. A következő használatig tegye vissza a védőkupakot a szórófejre.

Ha a használat során jelentős kellemetlenség jelentkezik, hagyja abba a kezelést, és forduljon orvoshoz.

Ajánlott adagolás

Felnőtteknek és gyermekeknek 1-éves kortól: igény szerinti gyakorisággal mindkét orrnyílásban.

Ellenjavallatok és mellékhatások

Az ajánlott terápiás adagok mellett mellékhatásokat nem írtak le, de ha mégis ilyen tapasztal, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

A termékkel kapcsolatos bármely súlyos, nemkívánatos eseményt jelenteni kell a gyártónak, a forgalmazónak és az adott ország illetékes egészségügyi hatóságának.

Az ajánlott adagok mellett kölcsönhatások nem ismertek. Ennek ellenére ajánlott orvosával konzultálni, ha bármilyen gyógyszert szed.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Gyermekektől elzárva tartandó.

Az orvostechnikai eszköz bármely összetevőjével szembeni ismert vagy feltételezett allergia esetén használata elővigyázatosságból kerülendő.

Higiéniai okokból és a kórokozók átvitelének megelőzése érdekében ezt a flakont egynél több személy ne használja.

A hialuronsav forrása nem állati eredetű, bakteriális fermentációból származik.

Tárolás és lejárati idő

- Ne használja a terméket a dobozon és a flakonon feltüntetett lejárati idő után.
- A felbontást követő 3 hónap után dobja ki.
- Hűvös, száraz helyen, 40°C alatt tárolandó.
- A flakont és a védőkupakot a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezze.
- A termék használata során ajánlott megőrizni a dobozt és a használati útmutatót.

Kiszerelés

Hajtógázmentes spray 20 ml-es flakonban, szórófejjel.



Ha megismerjük a termékkel kapcsolatos tapasztalatait, az segít nekünk a fejlődésben.

STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 – Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès – Barcelona – Spanyolország
Ügyfélszolgálat: +34 666 570 401
www.stepharmaceuticals.com



LEGAL BEAUTY KFT.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
+36-70-7-999-999,
www.elysium.hu, info@elysium.hu



REF PL0090

Kiadás dátuma: 17/07/2024
Változat: 04