

ELYSIUM® IZOTÓNIA S TENGERVIZES ORRSPRAY

0,9%-os sóoldat mindennapos hidratáláshoz

Az ELYSIUM® IZOTÓNIA S TENGERVIZES ORRSPRAY 0,9%-os fiziológiás sótartalmú, izotóniás tengervizes oldat, amely mechanikus hatásának köszönhetően erősen hidratálja az orrüreget, segít az orrvládék fellazításában és eltávolításában, ezáltal elősegíti az orrjáratok átjárhatóságát. **Az ELYSIUM® IZOTÓNIA S TENGERVIZES ORRSPRAY** rendszeres használata a csecsemők, gyermekek és felnőttek mindennapos orrhigiéniájában egy olyan terápiás segítség, amely kiegészíti többek között az orr-garatgyulladás, elzáródással járó ornyálkahártya-gyulladás(rhinitis), arcüreggyulladás, orrszárazság, száraz nyálkahártya okozta rekedtség, valamint fül-orr-gégészeti- és gyermekgyógyászati kezeléseket. **Az ELYSIUM® IZOTÓNIA S TENGERVIZES ORRSPRAY** megőrzi a természetes tengervíz kedvező tulajdonságait. A termékhez felhasznált tengervíz a Bretagne-ban található Cancale-öbölből származik, amely kiváló vízminőségéről ismert. Az öböl különlegessége a kivételesen nagy, akár 12 méteres árapálykülönbség, valamint az erős tengeri áramlatok, amelyek megakadályozzák a víz szennyeződését. Ez az egyedülálló természeti környezet biztosítja, hogy a víz folyamatosan tisztuljon, és állandóan magas tisztaságú maradjon. A mintavétel automatikusan történik, amikor a vízminőség optimális, azaz a dagályt követő időszakban. A mintavételi terület A osztályú besorolással rendelkezik, és folyamatos egészségügyi ellenőrzés alatt áll, beleértve a mikrobiológiai, kémiai, fitoplankton- és pH-vizsgálatokat is.

Összetétel

Tisztított víz és tengervíz (0,9%-os NaCl koncentráció).

Használati útmutató

1. Rázza fel a flakont, majd távolítsa el a védőkupakot. Az első használat előtt néhányszor nyomja meg a pumpát, amíg egyenletes permet nem képződik.
2. Óvatosan vesse be a szórófejet az egyik ornyílásba, és nyomja meg a pumpát a termék alkalmazásához.
3. Hagyja kifolyni a felesleges oldatot, hogy a váladék is távozhasson, majd fújja ki az orrát.
4. Ismételje meg a műveletet a másik ornyílásban is.
5. Használat után tisztítsa meg a szórófejet, majd hagyja megszáradni.
6. A következő használatig tegye vissza a szórófeje a védőkupakot.

Szükség szerint alkalmazható napi több alkalommal.

Használati útmutató csecsemők számára

1. Fektesse le a babát úgy, hogy a feje kissé oldalra legyen fordítva, így a tengervíz könnyebben bejuthat az ornyílásba.
2. Nyomja le a szórófejet, és permetezzen néhány másodpercig.
3. Ültesse fel a babát, hogy az orrvládék ki tudjon folyni. A váladékot zsebkendővel törölje le.
4. Ismételje meg a műveletet a másik ornyílásban is.
5. Óvatosan törölje meg az ornyílások környékét, de ne helyezze a zsebkendőt mélyen a baba orrába. A használat után tisztítsa meg a szórófejet vízzel, majd szárítsa meg.

Alkalmazható mindkét ornyílásban napi 2–3 alkalommal.

Ellenjavallatok és mellékhatások

A javasolt adagolás mellett ismert mellékhatása nincs. Amennyiben irritáció vagy kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez.

A termékkel kapcsolatos bármely súlyos, nemkívánatos eseményt jelenteni kell a gyártónak, a forgalmazónak és az adott ország illetékes egészségügyi hatóságának.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Higiéniai okokból, valamint a kórokozók átvitelének megelőzése érdekében a flakont egynél több személy ne használja. Gyermekektől elzárva tartandó.

Tárolás

- Ne használja a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után.
- Hűvös, száraz helyen tárolandó.
- A palackot és a kupakot használat után megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezze.

Kiszárazás

120 ml-es hajtógáz nélküli nyomásos spray orr-applikátorral, amely csecsemők számára is használható 0-éves kortól.



Ha megismerjük a termékkel kapcsolatos tapasztalatait, az segít nekünk a fejlődésben.

STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 – Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès – Barcelona – Spanyolország
Ügyfélszolgálat: +34 666 570 401
www.stepharmaceuticals.com



LEGAL BEAUTY KFT.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
+36-70-7-999-999,
www.elysium.hu, info@elysium.hu



REF PL0032_120_Soft

Kiadás dátuma: 25/03/2025
Változat: 03