



Higanymentes lázmérő lerázóval és műanyag tokkal - TP100

Modell: MC-10

Használati útmutató



Rendeltetése

Az Elysium higanymentes lázmérő egy olyan orvostechnikai eszköz, amely alkalmas a testhőmérséklet mérésére szájon, hónaljban vagy végbélnyílásban.

Tartalom	1 db lázmérő 1 db műanyag tok 1 db lerázó
Műszaki leírás	A termék megfelel az EN12470-1:2000+A1:2009, Klinikai hőmérők szabványának. Üvegborítású, fémes folyadékkal töltött maximum lázmérő Mérési tartomány: 35-42°C Felbontás: 0,1°C Pontosság: + 0,1°C/-0,15°C Működési tartomány: 15°C és 30°C között Ha a tárolási hőmérséklet 15°C alatti, kérjük, a lázmérőt használat előtt helyezze 15-30°C közötti hőmérsékletű környezetbe legalább 1-2 órára, vagy 30-35°C közötti hőmérsékletű közegbe 10 percre. Tárolási feltételek: Tárolás és szállítás során a hőmérsékletnek -15 és 42°C között kell lennie, a páratartalom pedig nem haladhatja meg a 80%-ot.
Használata	1. Vegye ki a lázmérőt a műanyag tokból. 2. Mérés előtt ellenőrizze, hogy a lázmérő 36°C alatti hőmérsékletet mutat. 3. Minden mérés előtt és után alaposan tisztítsa meg a lázmérőt. Ennek során kérjük, vegye figyelembe a "Tisztítás" című részt. 4. Helyezze a lázmérőt a mérni kívánt testrészbe (hónalj, végbél vagy szájüreg). 5. Körülbelül 4 perc elteltével a lázmérő átveszi a test hőmérsékletét. A hajszálcsőben lévő mérőfolyadék szintje a pontos testhőmérsékleti értéket jeleníti meg. 6. A mérés után a mérőfolyadékot vissza kell folytatni a skála alá. Ehhez helyezze a lázmérőt a műanyag tokba, és csavarja rá a lerázót, majd fogja meg azt a felső végénél, és 15-20 gyors csuklómozdulattal "rázza le". MEGJEGYZÉS: Használat előtt és után fertőtlenítsen a lázmérőt. Kórházakban a fertőtlenítést tapasztalt személyzetnek kell végeznie.
Megbízható mérési módszerek	Szájon át történő használat - mérési idő: min. 4 perc, normál testhőmérséklet kb. 37°C. Az orvosok gyakran előnyben részesítik a szájon át történő lázmérést, mivel gyors és megbízható eredményeket nyújt. Helyezze a lázmérő érzékelő végét a nyelv bal vagy jobb oldalán található hősebek egyikébe a pontos mérés érdekében. Végbélben történő használat - mérési idő: min. 4 perc, normál testhőmérséklet kb. 37,6°C. A végbélben történő mérés előnyösebb gyermekek esetében. Kenje be a lázmérő végét testápolóval vagy babaolajjal, majd helyezze a beteg végbélnyílásába legfeljebb 2 cm mélyre.  Ha bármilyen ellenállásba ütközik a lázmérő behelyezésekor, kérjük, azonnal álljon meg. Hónaljban történő használat - mérési idő: min. 4 perc, normál testhőmérséklet: kb. 36,7°C. A hónaljban végzett lázmérés kevésbé pontos, mint a szájban vagy a végbélben végzett mérés. Törölje szárazra a hónalját egy tiszta törölközővel, és helyezze a lázmérő érzékelő végét a beteg hónaljába. Ügyeljen arra, hogy a páciens karja szorosan a testhez simuljon a mérés időtartama alatt.
Tisztítás	A lázmérő hermetikusan zárt, higiénikus üvegborítással rendelkezik, és korlátozás nélkül fertőtleníthető. A tisztító- és fertőtlenítőszer hőmérséklete nem haladhatja meg a 42°C-ot.  Használat előtt és után hideg, szappanos vízzel tisztítsa meg a lázmérőt. Fertőtlenítéshez törölje át 70%-os izopropil alkohollal átitatott vattával vagy ruhával, vagy helyezze a lázmérőt fertőtlenítőszerbe a gyártó által meghatározott időre. Ha a lázmérő eltörik, a kifolyt folyadékot szappanos vízzel megnedvesített kefével, papírtörülővel vagy ruhával távolítsa el. A törött alkatrészeket biztonságosan helyezze el a háztartási hulladék között.

Garancia	Rendeltetésszerű használat mellett a gyártó korlátlan garanciát vállal a lázmérő működésére és pontosságára (kivéve az üveg törését). A nem megfelelő kezelésből eredő károkra a garancia nem terjed ki.  Újrakalibrálás nem szükséges!
Ártalmatlanítás	A termék más háztartási hulladékkal együtt eldobható, azonban ajánlatos tájékozódni a speciális hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó hatályos nemzeti irányelvekről. Ha véletlen törést követően folyadék szivárog, a folyadékot nedves ruhával vagy más alkalmas anyaggal itassa fel.
Eltarthatósági idő	5 év
Ellenjavallatok	A lázmérő nem érintkezhet sérült vagy fertőzött testrészsel.
Figyelmeztetések	1. Tartsa a lázmérőt gyermekek számára elérhetetlen helyen. 2. A gyermekeket a lázmérés teljes időtartama alatt felnőtt felügyelete mellett kell tartani. 3. A betegeket tájékoztatni kell arról, hogy a mérés során, amíg a lázmérő a nyelvük alatt van, kerüljék a rágást, a beszédet és a mozgást a pontos eredmény érdekében. 4. Végbélben történő mérés esetén biztosítsa, hogy a gyermek kényelmesen fekvődjön. Segítsen a helyzet stabilizálásában, hogy a lázmérő vége megfelelően a helyén maradjon, elkerülve annak mély behelyezését vagy kicsúszását a végbélnyílásból. 5. Lázmérés előtt fél órával ne egyen, ne fürödjön és ne dohányozzon. 6. A termék nem alkalmas speciális felhasználási területekre, például koraszülöttek testhőmérsékletének mérésére vagy ovulációs hőmérőként történő alkalmazásra. 7. A mérőfolyadék nem érintkezhet nemes- vagy könnyűfémekkel, mivel ezekkel reakcióba léphet. 8. Ez a lázmérő nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Tartósan fennálló láz, különösen gyermekek esetében, orvosi ellátást igényel.

Szimbólumjegyzék

	Gyártó		CE jelölés
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben		Gyártási tételszám
	Olvassa el a használati útmutatót		Gyártási idő
	Egyedi termékazonosító		Lejárat idő
	Figyelmeztetés		Medical Devices
	Higanymentes		Referenciaszám
	Napfénytől távol tartandó		Nedvességtől távol tartandó


Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd.
 C2-Liandong U Gu, Xibei Town,
 Xishan District, Wuxi City,
 214194Jiangsu, P.R.C.


Lotus NL B.V.
 Koningin Julianaplein 10, le Verd,
 2595AA, The Hague, Netherlands.
 Tel: +31644168999
 Email: peter@lotusnl.com

Importőr: **Legal Beauty Kft.**
 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
 +36-70-7-999-999
 info@virusmaszk.hu
www.virusmaszk.hu