

ELYSIUM® HIPERTÓNIA S TENGERVIZES ORRSPRAY

2,2%-os sóoldat eldugult orrhoz

Az **ELYSIUM® HIPERTÓNIA S TENGERVIZES ORRSPRAY** egy olyan orvostechnikai eszköz, amelyet 3-hónapos kortól csecsemők, gyermekek és felnőttek egyaránt használhatnak az orr-garat nyálkahártyájának gyulladása, orrfolyás, az orrmelléküregek gyulladása, valamint a kiszáradt nyálkahártya okozta horkolás esetén. Az **ELYSIUM® HIPERTÓNIA S, TENGERVIZES ORRSPRAY** ozmotikus hatásának köszönhetően eltávolítja a felesleges folyadékot a nyálkahártya sejteiből. A felső légutak mechanikai tisztítása és az orrdugulás megszüntetése mellett ez az ozmotikus hatás segít csökkenteni a nyálkahártyák duzzanatát.

Az **ELYSIUM® HIPERTÓNIA S, TENGERVIZES ORRSPRAY** a tengervíz mechanikai hatásának köszönhetően erőteljesen hidratálja az orrjáratokat, segít a váladék kimosásában és eltávolításában, ami végső soron elősegíti a szabad légzést.

Az **ELYSIUM® HIPERTÓNIA S, TENGERVIZES ORRSPRAY** megőrzi a természetes tengervíz kedvező tulajdonságait. A termékhez felhasznált tengervíz a Bretagne-ban található Cancale-öbölből származik, amely kiváló vízminőségéről ismert. Az öböl különlegessége a kivételesen nagy, akár 12 méteres árapálykülönbség, valamint az erős tengeri áramlatok, amelyek megakadályozzák a víz szennyeződését.

Ez az egyedülálló természeti környezet biztosítja, hogy a víz folyamatosan tisztuljon, és állandóan magas tisztaságú maradjon.

A mintavétel automatikusan történik, amikor a vízminőség optimális, azaz a dagályt követő időszakban. A mintavételi terület A osztályú besorolással rendelkezik, és folyamatos egészségügyi ellenőrzés alatt áll, beleértve a mikrobiológiai, kémiai, fitoplankton- és pH-vizsgálatokat is.

Összetétel

Tisztított víz és tengervíz (2,2%-os NaCl koncentráció).

Használati útmutató

1. Rázza fel a flakont, majd távolítsa el a védőkupakot. Az első használat előtt néhányszor nyomja meg a pumpát, amíg egyenletes permet nem képződik.
2. Óvatosan vezesse be a szórófejet az egyik orrnyílásba, és nyomja meg a pumpát a termék alkalmazásához.
3. Hagyja kifolyni a felesleges oldatot, hogy a váladék is távozhasson, majd fújja ki az orrát.
4. Ismételje meg a műveletet a másik orrnyílásban is.
5. Használat után tisztítsa meg a szórófejet, majd hagyja megszáradni.
6. A következő használatig tegye vissza a szórófejet a védőkupakot.

Szükség szerint alkalmazható napi több alkalommal.

Használati útmutató csecsemők számára

1. Fektesse le a babát úgy, hogy a feje kissé oldalra legyen fordítva, így a tengervíz könnyebben bejuthat az orrnyílásba.
2. Nyomja le a szórófejet, és permetezzen néhány másodpercig.
3. Ültesse fel a babát, hogy az orrváladék ki tudjon folyni. A váladékot zsebkendővel törölje le.
4. Ismételje meg a műveletet a másik orrnyílásban is.
5. Óvatosan törölje meg az orrnyílások környékét, de ne helyezze a zsebkendőt mélyen a baba orrába. A használat után tisztítsa meg a szórófejet vízzel, majd szárítsa meg.

Alkalmazható mindkét orrnyílásban napi 2-3 alkalommal.

Ellenjavallatok és mellékhatások

A javasolt adagolás mellett ismert mellékhatása nincs. Amennyiben irritáció vagy kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez.

A termékkel kapcsolatos bármely súlyos, nemkívánatos eseményt jelenteni kell a gyártónak, a forgalmazónak és az adott ország illetékes egészségügyi hatóságának.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Higiéniai okokból, valamint a kórokozók átvitelének megelőzése érdekében a flakont egynél több személy ne használja. Gyermekektől elzárva tartandó.

Tárolás

- Ne használja a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után.
- Hűvös, száraz helyen tárolandó.
- A palackot és a kupakot használat után megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezze.

Kiszárazás

120 ml-es hajtógáz nélküli nyomásos spray orr-applikátorral, amely 3-hónapos kortól használható.



Ha megismerjük a termékkel kapcsolatos tapasztalatait, az segít nekünk a fejlődésben.

STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 – Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès – Barcelona – Spanyolország
Ügyfélszolgálat: +34 666 570 401
www.stepharmaceuticals.com



LEGAL BEAUTY KFT.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
+36-70-7-999-999,
www.elysium.hu, info@elysium.hu



REF PL0033_120_Soft

Kiadás dátuma: 25/03/2025
Változat: 03